

¿Alveolitis seca?  
Alivia el dolor.



# Alveogyl

Apósito alveolar



Alveogyl es el producto ideal para el tratamiento de la alveolitis seca. Alivia rápidamente el dolor del paciente por lo que le aconsejamos su uso. También puede utilizarse como apósito después de una extracción.

Alveogyl es un producto de autoeliminación que se aplica en un solo paso y no requiere suturas ni atención especial aparte del habitual seguimiento del proceso de cicatrización. Proporciona un efecto calmante en los tejidos alveolares que ayuda a aliviar rápidamente el dolor. Su consistencia fibrosa con fibras Penghawar permite rellenar fácilmente el alveolo y proporciona una buena adherencia a los mismos.

Características	Ventajas	Beneficios
Contiene fibras de Penghawar	Consistencia fibrosa	Buena adherencia al alvéolo durante todo el proceso de curación
Apósito alveolar en caso de alveolitis seca	Permite la hemostasia por compresión	Ayuda a aliviar rápidamente el dolor y protege de la sobreinfección
No se requiere sutura	No requiere un cuidado especial fuera de la observación del proceso de cicatrización	Cómodo y fácil de usar
Tratamiento de autoeliminación	Procedimiento en un solo paso	No es necesario concertar citas de seguimiento

## Indicaciones

Alveogyl es una pasta utilizada como apósito alveolar en caso de alveolitis seca o después de una extracción dental complicada o traumática en pacientes que presentan un historial con alveolitis secas.

## Modo de empleo

- Coger una bolita de pasta (alrededor de 0,20 g)
- Colocarla en el alvéolo dental, previamente preparado
- No suturar

## Presentación

Tarro con 10 g de pasta



**Septodont España** - Ronda President Irla, 28 1º planta (ed. cenema)  
08302 - mataró (barcelona) - España  
Tél. : +34 935 482 406  
Para más información, visite nuestra página:  
[www.septodont.es](http://www.septodont.es)

