



# Nexus

Adhesivo fotopolimerizable  
de 5º generación.

## Referencia:

ML60545

## Descripción:

Nexus es un agente adhesivo de 5ª generación, monocomponente, fotopolimerizable y altamente compatible con materiales restauradores. Su gran fuerza de adhesión garantiza una estrecha unión con el tejido dentario, lo que imposibilita las filtraciones marginales no deseadas.

## Composición:

Mezcla de metacrilato 55-95%  
Acetona 10-30%  
Acondicionador: 1-10%  
Iniciador, acelerador, inhibidor, fotoiniciador <1%

## Características:

- Agente adhesivo de 5ª generación
- Fotocurado por luz directa
- Alta fuerza de adhesión

## Propiedades físicas:

- Fotopolimerización: 20 seg.
- Fuerza de adhesión (esmalte):  $21.8 \pm 2.4$  MPa

## Indicaciones:

- Todas las restauraciones directas de composite y carillas.
- Cementación de restauraciones indirectas: metal, porcelana y composite
- Restauraciones adhesivas (unidas) de amalgama (para usar con activador).
- Como agente de unión de resinas de curado dual, autocurables y reconstrucciones de núcleos.
- Reparaciones de porcelana, composite y amalgama.
- Composite sobre metal y carillas directas.



Adhesivo fotopolimerizable  
de 5º generación.



### Precauciones:

1. Verifique la fecha de caducidad, aspecto de producto y embalaje.
2. Lea detenidamente las instrucciones de uso.
3. No lo use si el material está fotopolimerizado.

### Advertencias:

1. Nexus está diseñado para la venta y el uso exclusivo de profesionales médicos titulados.
2. Nexus solo se usa para el tejido oral duro.
3. Nexus contiene monómero metacrilato. Algunos pacientes pueden sufrir una reacción alérgica por intolerancia al monómero. En caso de producir una reacción alérgica o hipersensibilidad, suspenda su uso inmediatamente.
4. Evite el contacto de Nexus con los ojos, la nariz, la boca, la piel y la ropa.
5. Si Nexus entra en contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua y contacte inmediatamente con un oftalmólogo.
6. Use un dique de goma para proteger las vías respiratorias.
7. NO USE Nexus después de la fecha de caducidad indicada en la jeringa.
8. Si se usa almacenamiento refrigerado, permita que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
9. Evite el uso de sustancias fenólicas u otros materiales que contengan fenólicos en combinación con adhesivos dentales. Las sustancias fenólicas, especialmente las preparaciones que contienen eugenol, timol o aceite de clavo, interfieren con el curado de los materiales adhesivos dentales.

### Conservación y almacenamiento:

1. No exponga Nexus a temperaturas elevadas ni a la luz intensa.
2. Almacene Nexus a una temperatura entre 4°C y 28°C.
3. La vida útil es de 3 años a partir de la fecha de fabricación.
4. Compruebe en el envase externo la fecha de caducidad.
5. El adhesivo Nexus debe taparse inmediatamente después de su uso para minimizar la evaporación.
6. No almacene Nexus cerca de productos que contengan Eugenol.

### Contenido:

Bote de 5ml.