



Ocean

Ácido Grabador

FICHA PRODUCTO

Referencia:

ML60212E

Descripción:

Ocean es un gel de ácido ortofosfórico al 37% para grabado en esmalte y dentina. Su viscosidad permite una elevada precisión a la hora de aplicarlo sobre la pieza dentaria, siendo posible controlar el tiempo que permanece tanto en esmalte como en dentina.

Composición:

Diluyente 40-60%
Ácido fosfórico 37%
Dióxido de silicio 10-20%
Espesante 5-10%
Pigmento <1%

Características:

- Ácido ortofosfórico en gel al 37%.
- Elimina eficazmente la capa residual de detritus favoreciendo la adhesión del material restaurador al diente.
- Eliminación completa de residuos al lavar la cavidad.
- Excelente viscosidad.

Indicaciones:

- Grabado en dentina (7~10sec)
- Grabado en esmalte (15~20sec)

Precauciones:

- Verifique la fecha de caducidad, así como la apariencia y el estado del envase y el producto.
- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- El material no debe ser utilizado cuando no sea posible la técnica de aplicación descrita.



Ácido Grabador



Advertencias:

- Ocean es corrosivo y contiene ácido fosfórico.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Si se produce un contacto ocular accidental, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.
- Solo para uso dental.
- No use Ocean después de la fecha de caducidad.

Almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco y alejado de la luz solar, a una temperatura entre 4 y 28°C.
- La vida útil es de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Contenido:

4 jeringas de 4.3gr y 10 puntas.