

Finalidad de uso

Gutapercha sólida utilizada para la obturación del conducto radicular.

Preparación antes del uso

1. Antes de utilizar el producto, compruebe la fecha de caducidad y asegúrese de que no hay suciedad, polvo ni ninguna sustancia extraña. No utilizar si la gutapercha es demasiado dura y poco elástica.
2. Leer y comprender completamente las instrucciones del fabricante.
3. Preparar todos los accesorios e instrumentos necesarios antes del procedimiento.

Instrucciones de uso

Para realizar la endodoncia, el profesional de la odontología debe seguir los pasos siguientes.

1. Seleccionar un cono maestro de gutapercha que se adapte al ápice y comprobar la longitud de trabajo antes de rellenar el conducto radicular. Corte la punta del cono no utilizada antes de introducir la gutapercha en el conducto radicular.
2. Cuando la punta de gutapercha esté colocada dentro del conducto radicular, hacer radiografía para confirmar que la punta de gutapercha está situada a 1 mm del ápice y se ajusta perfectamente al conducto radicular
3. Retirar la punta de gutapercha del conducto radicular y secar con una punta de papel. Emplear una lima de un tamaño inferior a la utilizada para perforar el conducto radicular. (También puede utilizarse un instrumento de endodoncia profesional). Aplicar el sellador a la lima y extender el interior del canal. Terminar aplicando el sellador a la punta de gutapercha alrededor de 1mm e introducir en el canal radicular.
4. Este procedimiento es el método más común. Sin embargo, el profesional de la odontología puede contemplar usar más puntas de gutapercha o realizar el procedimiento de forma distinta en función de los síntomas del paciente.

· Las puntas de gutapercha son de un solo uso. No reutilizar.

Mantenimiento después del uso

Las puntas de gutapercha no utilizadas después del procedimiento deben guardarse en un recipiente a temperatura ambiente para evitar la contaminación

Manipulación y almacenamiento

1. Almacenar a temperatura ambiente.
2. Mantener alejado de materiales inflamables y combustibles y del calor.
3. No tirar los productos mientras se transportan.
4. Guardar separado de otros productos de distintos tamaños y tipos.

Precauciones de uso

· Precauciones y advertencias generales

1. El producto debe utilizarlo únicamente profesionales de la odontología y deben seguirse cuidadosamente las instrucciones de uso.
2. No utilizar en pacientes con inflamaciones o que sean alérgicos al producto.
3. Este producto es solo para uso externo y debe recetarse para uso interno.
4. Cubrir las vías respiratorias del paciente con un dique de goma antes del procedimiento.
5. Cerrar bien la tapa una vez usada.

· Precauciones de uso

1. Comprobar si hay alguna infección secundaria en el interior del conducto radicular antes de colocar la punta de gutapercha.
2. Utilizar el mismo tamaño y grosor de lima y punta de gutapercha.
3. Hacer una radiografía después de la intervención para asegurarse de que el canal se ha rellenado por completo.

Vida útil

4 años desde la fecha de fabricación.

Símbolos



Fecha de caducidad



Número de lote



Referencia de producto




Fabricante



Mantener alejado de la luz solar



Representante autorizado en la Comunidad Europea

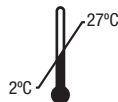

Limitación de temperatura



Proteger de la humedad



Instrucciones de uso



Esterilizado por irradiación



Precaución



De un solo uso



Dispositivo médico