

BADER

SUSTITUCIÓN DE DIENTES ENROSCABLES SOBRE MODELO PARA ENSEÑANZA.

Paso 1- Desatornille la pieza que va a sustituir.




Paso 2- Coja la pieza de reemplazo. Presente el tornillo y preforme la rosca. Nota: Utilice siempre los tornillos que acompañan los dientes de sustitución.



BADER

Paso 3- Encaje la pieza sobre la base y mantenga presionado el diente en la acción de atornillado final.

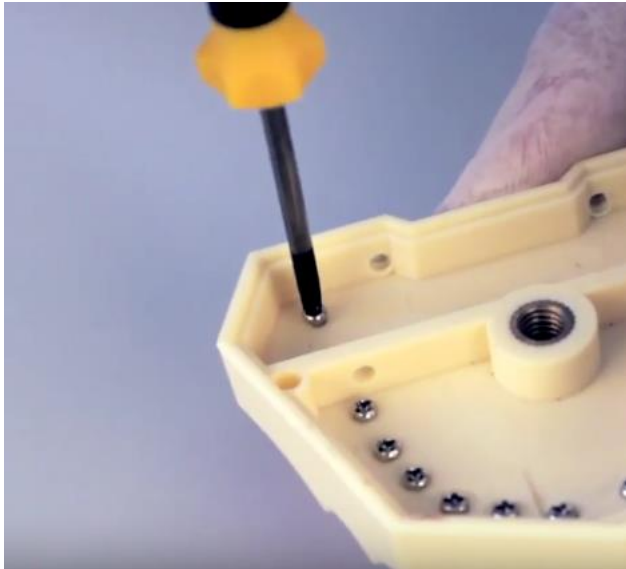

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

Los dientes del modelo anatómico son fabricados en plástico duro de alta resistencia, lo que los hacen idóneos para la práctica en odontología. En la acción de sustitución siempre se corre el riesgo que el diente se fisure o parta, por eso es recomendable preformar la pieza. Incluso poner vaselina o un lubricante en el tornillo. También es recomendable cortar el tornillo, sobre todo para piezas anteriores.

