



SEPARADOR DE AMALGAMA – Mantenimiento

El contenedor recolector está diseñado para un solo uso

La reutilización de un contenedor usado puede causar un mal funcionamiento y viola las normas de garantía.

Intervalos de reemplazo

La vida útil máxima (intervalo de reemplazo) de los separadores de amalgama resulta de las horas de trabajo.

MST 1 / COMPACT Dynamic

Una señal acústica (“bip”) y una luz de flash en la pantalla le recordarán que debe cambiar el contenedor. Intervalo máximo de cambio: 1 año, incluso si aún no se ha alcanzado el nivel máximo de llenado.

ECO II

El ECO II debe reemplazarse tan pronto como se haya alcanzado el nivel máximo de llenado (control visual). Intervalo de cambio máximo: 1 año incluso si aún no se ha alcanzado el nivel de llenado máximo.

Recolección de residuos / Reciclaje

N.º de art.



55020130

ECO II internacional

Separador de amalgama por sedimentación, contenedor de intercambio

55020001

Recipiente de repuesto MST 1

Internacional

55020005

Recipiente de repuesto COMPACT Dynamic

Internacional

Kit de mantenimiento MST 1



50020109

Kit de mantenimiento MST 1, 1 año

Cuerpo básico de entrada con válvula antirretorno integrada, filtro bomba, membrana válvula selectora y contenedor de reemplazo.

50020110

Kit de mantenimiento MST 1, 5 años

Cuerpo básico de entrada con válvula antirretorno integrada, cajón de filtro, filtro bomba, tapa de centrifugadora, anillo desplazamiento de agua, deflector de aire, membrana válvula selectora, cámara de centrifugado, tapa de bomba centrifugado y contenedor de reemplazo.

Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic



50040030

Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic, 1 año

Rotor completo, junta, parte superior separador con membrana, contenedor reemplazo

50040031

Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic, 5 años

Rotor completo, junta, centrifugadora, filtro bomba, parte superior separador con membrana, contenedor reemplazo



SEPARADOR DE AMALGAMA - Mantenimiento

Información sobre reclamaciones de garantía

1. Las reclamaciones de garantía de nuestros productos son válidas por un período de 12 a 36 meses (dependiendo del producto). Las condiciones de garantía de METASYS se basan principalmente en los términos y condiciones actualmente vigentes de METASYS.
2. Esta garantía incluye todas las reclamaciones relacionadas con fallos materiales que afectan la función del dispositivo. Los daños causados por el manejo incorrecto o inapropiado, la abrasión normal y el intercambio del contenedor de amalgama de recolección están excluidos de garantía. Las tasas de mantenimiento obligatorio deben cumplirse con precisión. El productor se reserva el derecho de solicitar los correspondientes documentos del producto para determinar las tarifas de servicio.
3. Para validar el reclamo de garantía, es necesario hacernos llegar la prueba de instalación del separador de amalgama inmediatamente después de la instalación, y nunca más de 24 meses después de la fecha de venta de METASYS.
4. Tanto la instalación como las inspecciones requeridas deben ser realizadas por un técnico capacitado por METASYS y deben estar registradas en el libro de registro del equipo METASYS.
5. Puntualizamos que los reclamos de garantía para los separadores de amalgama solo pueden hacerse valer si el dispositivo ha sido tratado con el mantenimiento anual del servicio y el uso permanente del desinfectante del sistema de succión METASYS GREEN&CLEAN M2.

GREEN&CLEAN M2

Concentrado antiespumante dual y activo para la limpieza, desinfección y desodorización diarias de equipos de aspiración y separadores de amalgama

Características	utilizar 2 veces al día (a mediodía y por la tarde) y tras toda intervención quirúrgica Enjuagar el sistema con agua fría después de cada tratamiento Alternar de color de limpiador después de 83 aplicaciones (1 botella) Llevar guantes de protección en la desinfección Mantener exactamente la dosificación y el tiempo de actuación
------------------------	---

N.º de art.

60010201	GREEN&CLEAN M2 Juego de inicio, 2 botellas de 500 ml + dispensador
60010202	GREEN&CLEAN M2 Juego de relleno I, 4 botellas de 500 ml
60010203	GREEN&CLEAN M2 Juego de relleno II, 2 botellas de 500 ml

Aplicación



1. Accionar dos veces la bomba dosificadora (= 6 ml de concentrado)



2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca (= 600 ml solución al 1%)



3. Colocar la cánula pequeña en el orificio marcado con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)



4. Colocar la cánula grande en el orificio marcado con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)



5. Vaciar el líquido restante en la taza de la escupidera (200 ml)



6. Esperar el tiempo de actuación y luego enjuagar (HBV/HIV/HCV: 60 min, tuberculicida: 240 min)

