


BADER[®]

LÁMPARA QUIRÚRGICA

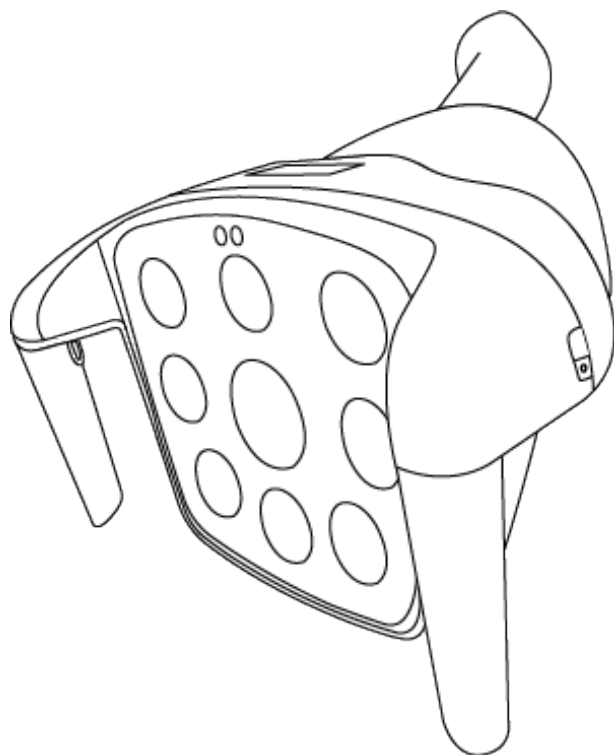

CE



LÁMPARA QUIRÚRGICA

Gracias por comprar un producto de nuestra marca Bader®. Para asegurar un correcto uso del mismo, por favor lea atentamente el siguiente manual de instrucciones y montaje.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Antes de poner en marcha este dispositivo, obedezca las precauciones de seguridad básicas que se enumeran a continuación, para evitar el riesgo de daños al dispositivo o al usuario, así como prevenir incendios y descargas eléctricas.



Cumpla las instrucciones del dispositivo y el manual; si no puede comprender las instrucciones, solicite ayuda a nuestro personal de servicio posventa o al agente de ventas.

- Apague la fuente de alimentación antes de reparar el dispositivo.

ADVERTENCIAS DE USO

La garantía no es válida si no se siguen estas reglas a continuación. Siga las instrucciones correctamente:

- Utilice el dispositivo según las instrucciones únicamente.
- No poner y/o colgar ningún objeto ni colgarse al dispositivo con el peso del cuerpo de una persona. El incumplimiento de este requisito puede causar la caída de dichos objetos en la zona de operación.
- No cubrir la cúpula del producto durante su funcionamiento para evitar sobrecalentamiento.
- Evitar que el producto choquen entre sí o equipos cercanos.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La lámpara quirúrgica es un dispositivo destinado a ser utilizado en clínicas dentro del área paciente para iluminar localmente. Su estructura está pensada para ser instalada directamente en el sillón dental.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura ambiente: 5°C - 40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 500 -1060hpa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Tensión de alimentación: 12 - 24Vac (50-60 Hz)
- Potencia: 26W
- Iluminación: ~7000 - 60000Lux
- Temperatura de color: 4000K - 5000K
- Peso: (Neto:1500g - Bruto:2000g)

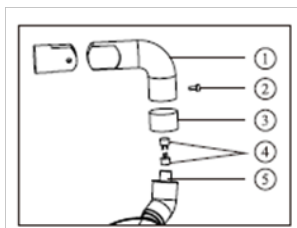

INSTALACIÓN

- Se conectan las fichas eléctricas (4) para alimentar la lámpara.
- Se introduce el embellecedor (3) antes de fijar la estructura
- Se unen las partes 2 y 3 hasta que coincidan las roscar para fijar el tornillo.
- Se desliza el embellecedor

ESTRUCTURA DE LÁMPARA

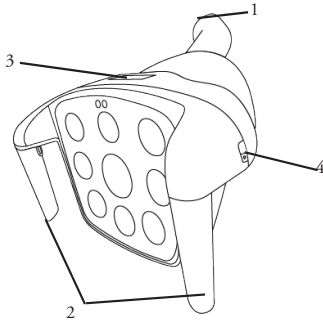

1	Soporte. Permite rotación
2	Asas
3	Botón deslizante de cambio de color. Luz blanca/amarilla
4	Sensor ON/OFF

FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DE POSICIÓN

Ajuste el ángulo del mango a la posición anclada tal y como aparece en la imagen.

- Afloje el tornillo para ajustar el ángulo y apriete el tornillo para uso normal.
- Ajuste el ángulo y la distancia de operación de la luz tirando de las asas.

ENCENDIDO/APAGADO

- Interruptor de sensor: Deslice la mano sobre el interruptor de sensor para encender o apagar la luz.) distancia de detección 0-100mm
- Interruptor de palanca: Toque el interruptor de la manilla para encender y apagar la luz.

AJUSTE DE INTENSIDAD

Para ajustar la intensidad, pulse la palanca prolongadamente y la intensidad de luz comenzará a cambiar pasado 1 segundo. Mantenga pulsado hasta encontrar la intensidad deseada. Oirá un pitido cuando se alcancen las intensidades máxima y mínima.

AJUSTE DE COLOR DE LUZ

La luz está equipada con un ajuste diseñado para usarse mientras se manipulan materiales activados por luz. El ajuste se utiliza para filtrar la luz azul de modo que se reduzca el efecto de la luz azul en los materiales activados por luz. Mueva el botón situado en el frontal del equipo para cambiar de luz normal a luz filtrada amarilla.

MANTENIMIENTO

Se recomienda la limpieza del producto cada día antes de cada empleo. Para proceder a la limpieza del producto:

- Asegúrese de que la lámpara esté desenchufada.
- Limpiar con un paño suave y húmedo.
- No use una solución de limpieza cáustica ni un paño áspero para limpiar o frotar el frontal de la luz.
- El mango puede ser esterilizado a altas temperaturas en el autoclave.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

Estimado cliente: le expresamos nuestro agradecimiento por haber depositado su confianza en un producto de nuestra marca cuya calidad ha sido verificada bajo los más estrictos controles y está avalada por el presente:

BADER EUROPE GROUP, S.L provista de C.I.F. B27804657 garantiza este producto en los siguientes términos y condiciones:

1. El producto amparado por este certificado está protegido durante el periodo de dos años contados a partir de la fecha que figura en el ticket o factura justificativa de la compra, siendo su alcance territorial toda la Europa.
2. Durante dicho periodo de garantía, en caso de defecto de fabricación, el consumidor tendrá derecho a la reparación del mismo. Las reparaciones serán gratuitas y se llevarán a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la finalidad que tuviera para el consumidor.
3. Quedan excluidas de esta garantía las averías, desperfectos o daños ocasionados en el producto como consecuencia de: malos tratos, uso indebido, exposición a condiciones climatológicas adversas, ubicación en entornos inadecuados para el producto con polvo, suciedad y humedad, abusos, golpes, caídas, instalación inadecuada o insuficiente, fallos de suministro eléctrico, desgaste por uso, reparaciones llevadas a cabo por personas distintas a la asistencia técnica indicada, así como por alteración de los datos que figuran en este certificado y/u otras causas externas al propio producto.
4. Esta garantía quedará automáticamente anulada en caso de manipulación errónea o se haya utilizado el mismo incumpliendo las normas contenidas en los manuales o instrucciones referentes a uso, funcionamiento, servicio y modo de empleo.
5. La garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de ley.
6. En el supuesto de que precisara cualquier tipo de asistencia técnica relacionada con el producto el consumidor deberá dirigirse al distribuidor o establecimiento de compra.
7. Para cuantas cuestiones puedan surgir con el motivo de la interpretación o ejecución de la presente garantía se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de aplicación.
8. Este certificado ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de equipo.
9. Acompañe ticket o factura de compra junto a la garantía debidamente cumplimentada.

MARCA Y MODELO: SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

Nº DE SERIE O LOTE: FECHA DE COMPRA: