

	TÍTULO:	PORTA AGUJAS	CÓDIGO: FT-SGC063.01
			REEMPLAZA: N/A
	FECHA DE EMISIÓN:	23/OCT/2020	No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Porta agujas de acero recto con sistema de cierre de tipo cremallera.
- La pinza posee concavidades y estrías para ayudar a que la aguja no se mueva durante la manipulación y sostener firmemente el hilo.
- El tamaño del porta agujas debe ir de acuerdo con el tamaño de la aguja.
- Presentan ramas cortas y firmes para sujetar la aguja sin dañar el material de sutura.

2. FINALIDAD

- El porta agujas permite posicionar la aguja de sutura para realizar las técnicas de cosido.
- Utilizados para sostener agujas curvas.

3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Porta agujas 14 cm.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 12-006: PORTA AGUJAS CLARBEN 14 cm.

6. MODO DE EMPLEO

- Con una coger el hilo de la sutura que lleva la aguja.
- Con la mano dominante sujetar el porta agujas, introducir los dedos anular y pulgar en los orificios del instrumento y utilizar el dedo índice como apoyo. También puede sujetarse el porta agujas sin introducir los dedos en los orificios del porta y sujetándolos con los tres últimos dedos de la mano utilizando el dedo índice como apoyo.
- El porta agujas debe sostener la aguja por el cuerpo y no en los extremos.

7. ADVERTENCIAS

- Empleo por personal capacitado.
- El tamaño del porta agujas debe ir de acuerdo con el tamaño de la aguja.
- Precaución para evitar aplastar o doblar el material de sutura durante el uso del porta agujas.

8. IMAGEN

