

	TÍTULO: OCTOOP®	CÓDIGO: FT-SGC53.01
	FECHA DE EMISIÓN: 02/JUN/2020	REEMPLAZA: FT-SGC028.01
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

El indicador de caries OCTOOP® es un colorante FD&C de color verde con una base de glicol de polipropileno que permite diferenciar visualmente entre la dentina cariada (infectada) y la dentina remineralizable (sana), gracias a su capacidad de pigmentación selectiva de la dentina cariada.

2. FINALIDAD

Indica la existencia de caries mediante la diferenciación visual entre dentina cariada (infectada) y dentina remineralizable (sana).

3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

- 1 frasco cuentagotas de plástico de 5 mL.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 04-022: OCTOOP detector de caries frasco 5 mL.

6. MODO DE EMPLEO

- Mantener el acceso a la cavidad en buen estado de higiene.
- Lavar y secar la dentina cariada.
- Dispensar 1 o 2 gotitas del producto en una cubeta y aplicar en la cavidad con un cepillo o algodón.
- Esperar de 5 a 10 segundos y aclarar con agua pulverizada.
- Retirar la dentina infectada teñida de color verde.
- Repetir la aplicación hasta que las manchas de dentina cariada hayan desaparecido por completo.

7. ADVERTENCIAS

- Se debe usar un instrumento rotatorio a baja velocidad para eliminar la dentina cariada ya que el calor generado por fricción con una herramienta a alta velocidad puede provocar dolor antes de eliminar completamente la dentina cariada externa.
- No contiene ingredientes peligrosos en concentraciones suficientes como para ser perjudicial para la salud de las personas ni que puedan causar irritación en los tejidos bucales en caso de uso distinto al indicado.
- El producto debe almacenarse a una temperatura entre 10°C y 24°C. Se debe cerrar bien la tapa después de usar el producto. Mantener alejado de focos de humedad. Almacenar después de abrir en un lugar fresco y seco para no afectar a la vida útil del producto.

OCTOOP®

CÓDIGO:

FT-SGC53.01

No. PÁG.:

3 de 3

8. IMAGEN

