


INDIVIDUALIZADORA RECORTADORA DE MUÑONES

Ref. 09060114

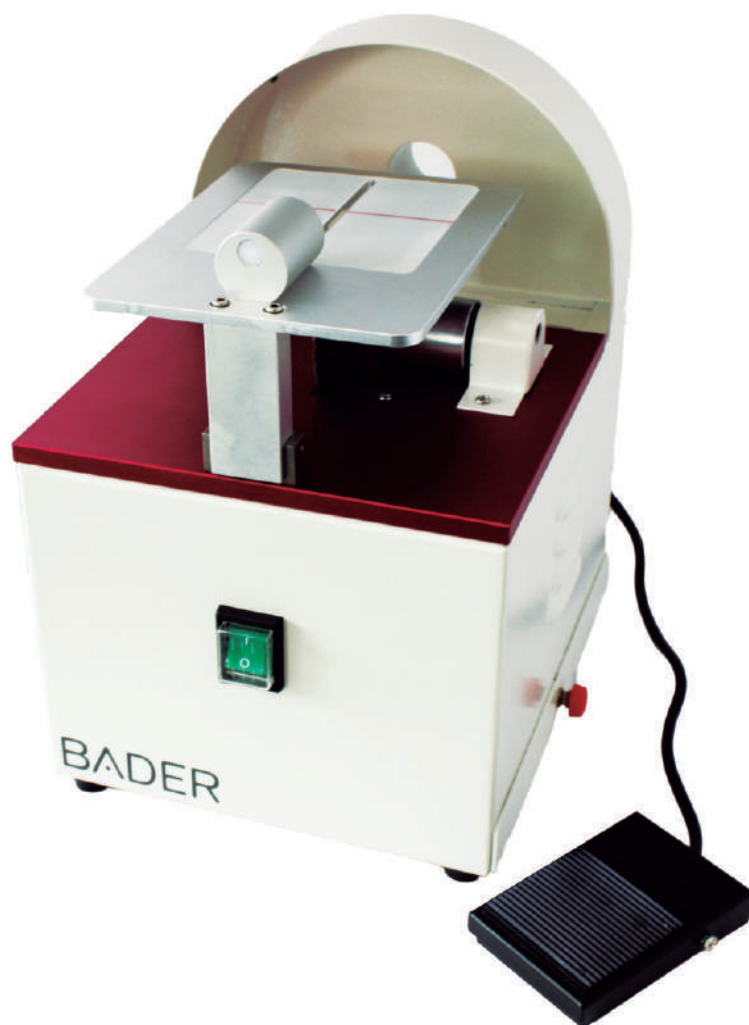

BADER[®]

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307

INDIVIDUALIZADORA DE MUÑONES

El método de individualizar más sencillo, limpio y preciso

Hasta ahora, muchos muñones tenían que ser cortados manualmente dentro del laboratorio dental, sin marcar la correcta alineación entre espacios. Con la recortadora de muñones este problema está solventado, debido a la precisión de la marca con un corte perfecto delimitado por la línea láser.

La máquina recortadora ha sido construida para ser utilizada específicamente en la separación de muñones mediante una hoja de disco de diamante.

Realiza todo tipo de corte de sierra sin dañar el límite de preparación:


- Línea de marcado por láser asegura la facilidad de conveniencia y permite un posicionamiento preciso del corte.
- El diseño ergonómico y funcional.
- El arranque suave y parada instantánea.
- Rodamientos de bolas de accionamiento directo con una alta potencia de arrastre.
- La profundidad exacta de corte, puede ser determinada para lograr el acabado óptimo.

CARACTERÍSTICAS:

- El corte se hace por el lado del zócalo del modelo.
- La orientación del corte se elige con la ayuda de un indicador láser.
- Posibilidad de conectarlo con un sistema de aspiración.
- Contiene un disco diamantino especialmente diseñado para hacer el corte más fácil.
- Profundidad del corte 26.5cm.

DATOS TÉCNICOS:

Alimentación	220Vac / 50Hz
Potencia	100W
Velocidad de rotación	2800rpm
Espesor de corte	0.25mm
Dimensiones	31cm x 30cm x 26cm
Disco	80mm
Peso	12kg

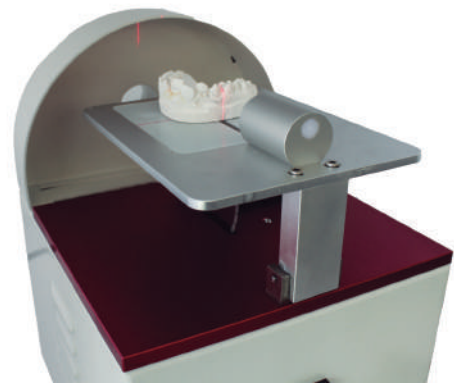

MANTENIMIENTO:

Limpie la máquina de vez en cuando con un paño limpio de polvo. Nunca utilice aire comprimido o productos de limpieza.

CAMBIO DE DISCO:

Coloque las dos llaves Allen en los laterales del disco. Fije con la llave más pequeña la parte posterior de eje de rotación y gire hacia un lado con la otra llave.

