



146

El aspirador, en la configuración AS146, se puede combinar con la recortadora de modelos en seco SQ149D, o también con recortadoras de modelos de otras marcas, para la eliminación del polvo de yeso generado durante el mecanizado en ausencia de agua.

En esta configuración, el aspirador está equipado con un filtro de tela adicional que se coloca en los bordes del depósito interno para proteger el motor. Este filtro se obstruye durante el uso y, por lo tanto, debe limpiarse de vez en cuando (soplado o sacudido) para restaurar su eficacia.

El polvo de yeso se recoge en el contenedor principal y luego debe ser retirado y eliminado de acuerdo con las normas vigentes.

SIRIO DENTAL Srl Via

A.Accardi, 11 – 4714 Meldola FC – Italia Reg.

Empresas de Forlì-Cesena – Código fiscal y número de IVA: 03694510409 – Capitale soc. 60.000 € iv

Tel. +39 0543 490327 – Fax: +39 0543 499126

Correo electrónico: sirio@siriodental.com Sitio web<. www.siriodental.it

SR927A



El aspirador, en la configuración SR 927A, se puede combinar con la arenadora (SR921, SR922, SR923, o incluso de otras marcas) para eliminar el polvo que queda suspendido en el interior de la máquina durante la operación de arenado.

En esta configuración, se fija una bolsa de papel especial dentro del contenedor principal (similar a las bolsas para aspiradoras domésticas) en la que se recoge el polvo de arena aspirado.

Cuando la bolsa de papel esté llena, debe retirarse y reemplazarse por una nueva. La bolsa que contiene el polvo recogido debe eliminarse de acuerdo con la normativa vigente.

Las bolsas se suministran en paquetes de 10 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERSIÓN	AS146	SR927A
Tensión de alimentación	230V CA – 50Hz	230V CA – 50Hz
Fuerza	1000W	1000W
Conexión	Recortadora de modelos en seco	Chorro de arena
Accesorios	FILTRO BLANCO ADICIONAL Para limpiar de vez en cuando	BOLSA DE PAPEL De un solo uso
Cantidad suministrada	1	3
Peso	11 kilos	11 kilos
Huella horizontal	40x40cm	40x40cm
Altura	58cm	58cm
Dimensiones Embalado	cm44x44x63	cm44x44x63

El aspirador puede pasar de una configuración a otra simplemente cambiando los filtros

ACCESORIOS

AS 144 : filtro de yeso adicional para AS 146

AS 143: Filtro principal de tela y collarín de plástico (común a ambos tipos)

SR 928 S: Pack de filtros de papel para SR 927 (SET de 10 uds)