


## Conectar un ángulo llano o contra ángulo

1. Inserte un Ángulo Llano o Contra ángulo hasta que su superficie lateral alcance la superficie lateral del Micro motor.
2. En caso del primer uso tras la compra del Ángulo Llano o Contra ángulo, opere la Pieza de mano sin carga a unos 20.000RPM durante 10 minutos antes de usarlo.

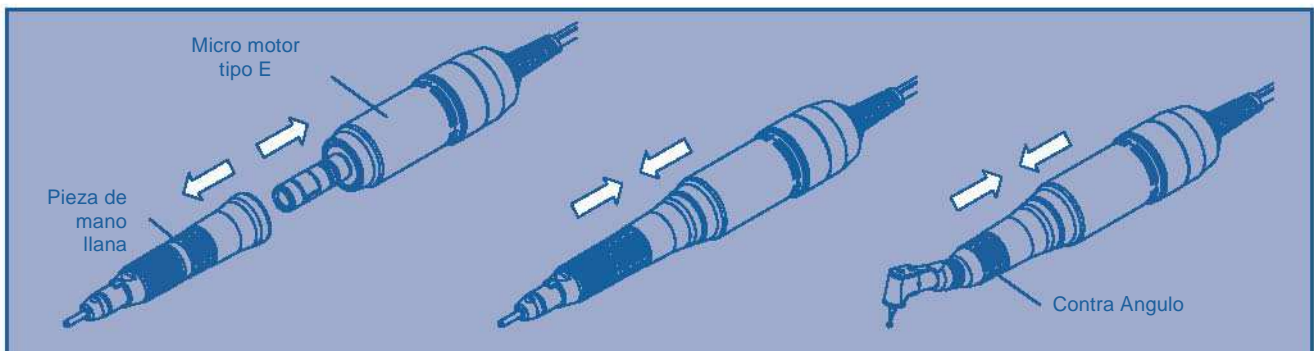

## Reemplazar las escobillas de carbón

1. Después de apagar la Unidad de control, quite la cubierta de la Caja de carbón y el Cable del motor de la parte posterior de la Pieza de mano.
  2. Saque las escobillas de carbón usadas después de quitar los tornillos de la escobilla de carbón con un destornillador (+).
  3. Reemplácelas con escobillas nuevas asegurándose de que el Muelle de la escobilla quede trabado en el Soporte de la escobilla de carbón.
  4. Monte la pieza de mano.
  5. Después de hacer funcionar la Pieza de mano en modo sin carga a unos 20.000RPM durante 30 minutos, entonces úsela.
- ★ El ciclo de reemplazo de las Escobillas de carbón es aproximadamente un año, dependiendo de las horas de trabajo y las condiciones de carga.

