

	TÍTULO: HEMOCLAR SOLUCIÓN	CÓDIGO: FT-SGC073.01
	FECHA DE EMISIÓN: 17/MAR/2021	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

1. CARACTERÍSTICAS

- Hemoclar es una solución de cloruro de aluminio tamponado al 25% destinada a restringir y detener el sangrado leve y controlar los fluidos en el surco que rodea al diente durante el procedimiento dental en la boca.
- Composición: cloruro de aluminio, glicerina, agua purificada y excipientes.
- Gel de cloruro de aluminio al 25% destinado a restringir y detener el sangrado.
- Este producto ayuda al control de líquidos en el surco que rodea al diente durante el procedimiento dental.

2. FINALIDAD

- Solución encargada de restringir y detener el sangrado durante los procedimientos de restauración, preparaciones de corona dental y profilaxis oral.

3. CLASIFICACIÓN

- Producto sanitario clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Solución de vidrio de 15 ml con cuentagotas dispensador.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 06-076: HEMOCLAR SOLUCIÓN.

6. MODO DE EMPLEO

- Aplicar directamente en el lugar requerido con una bolita de algodón saturada.

7. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto prolongado o repetido con la piel (dermatitis alérgica por contacto) y los ojos.
- Evitar inhalación prolongada.
- El contacto con la piel puede provocar irritación y quemaduras. Si se produce contacto con la piel, límpielo inmediatamente con un algodón y alcohol y luego lave la zona bien con agua y jabón.
- En el caso en el que haya alguna reacción, ya sea erupción cutánea y sensibilización u otra alergia, suspenda el uso del producto y busque atención médica.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar con un médico.
- No usar en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquiera de los componentes presentes en la solución.
- El desecho del producto debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes en el país en el que se utiliza.

8. IMAGEN

