

SISTEMA AVANZADO DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

P
O
L
A

SDI

SDI

P O L A

SISTEMA AVANZADO DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

Personalice un tratamiento de blanqueamiento adecuado a las necesidades de su paciente



Para aplicar en la consulta

Pola Rapid

Peróxido de hidrógeno al 6%	3 x aplicaciones de 15 minutos
-----------------------------	--------------------------------

Para aplicar en casa

Pola Day

Peróxido de hidrógeno al 6%	1 o 2 x aplicaciones de 30 minutos o 1 x aplicación de 45 minutos al día
-----------------------------	---

Pola Night

Nota: Peróxido de hidrógeno al 1 % equivale a un 2.77% de peróxido de carbamida

Peróxido de carbamida al 10%	1 × 2 horas a toda la noche
------------------------------	-----------------------------

Peróxido de carbamida al 16%	1 × 2 horas a toda la noche
------------------------------	-----------------------------

Pola for Aligners

Peróxido de carbamida al 10%	1 × 2 horas a toda la noche
------------------------------	-----------------------------

Pola Light

Peróxido de hidrógeno al 6%	2 × 10 o 2 × 15 minutos al día
-----------------------------	--------------------------------

Para completar el tratamiento

Pola Luminate

6% hydrogen peroxide	2 x aplicaciones de 30 minutos al día
----------------------	---------------------------------------





Para aplicar

en la consulta



Pola Rapid

Pola Rapid es el nuevo tratamiento blanqueador en clínica que blanquea los dientes de forma segura en un tiempo de aplicación récord de tan solo 45 minutos.

Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 6 % que libera los principios activos inmediatamente.

Indicaciones:

1. Blanqueamiento de dientes vitales descoloridos.
2. Blanqueamiento de dientes no vitales descoloridos .

Manipulación superior y retirada rápida

El gel de mayor viscosidad de Pola Rapid permite una aplicación y una retirada más rápidas gracias a sus cualidades antiadherentes especialmente formuladas. Pola Rapid se extruye rápida y fácilmente y permanece sobre los dientes al aplicarse.

Gel azul mejorado para una aplicación más rápida

Pola Rapid emplea un avanzado gel azul para facilitar la visibilidad y la aplicación. El gel antiadherente y fácil de aplicar, permite una aplicación y una retirada más rápidas.

Administración sencilla y aplicación precisa

No es necesario realizar ninguna mezcla. El sistema de jeringa con doble cilindro mezcla el contenido a medida que se aplica el gel directamente sobre el diente.

La punta de cepillo suministrada contribuye a garantizar una aplicación más uniforme y precisa.

Procedimiento sencillo

Sin aislamiento de tejidos blandos. Con una preparación dental sencilla y un tiempo de contacto rápido por aplicación, reduce el tiempo de consulta y mejora la productividad.

Agentes desensibilizantes incorporados

Pola Rapid cuenta con unas propiedades desensibilizantes únicas que inhiben la sensibilidad postoperatoria. El nitrato de potasio es el componente clave para reducir el dolor y previene la sensibilidad para proporcionar un efecto calmante. El alto contenido de agua de Pola Rapid garantiza el máximo confort durante y después del tratamiento.

Liberación de flúor para fortalecer los dientes

Pola Rapid contiene flúor, que ayuda a fortalecer los dientes y protege de la sensibilidad.

Posibilidad de uso con o sin luz blanqueadora

Pola Rapid puede utilizarse con o sin luz blanqueadora, ya que no requiere calor para activarse.





A close-up portrait of a woman with long, wavy blonde hair. She is wearing a dark blue velvet dress with a subtle shimmer. Her right hand is resting under her chin, and she is wearing a wide, sparkling diamond bracelet on her right wrist. She is also wearing large, ornate diamond earrings. The background is a solid dark blue. The text 'Para aplicar' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font.

Para aplicar



Pola Day

Pola Night





Liberación de flúor

Tanto Pola Day como Pola Night contienen flúor, el cual ayuda a fortalecer el diente para protegerlo contra la sensibilidad.

Seguro y cómodo

Pola Day y Pola Night cuya formulación tiene un alto contenido en agua y pH neutro, protege las encías y los dientes durante el tratamiento.

Blanqueamiento eficaz

El efecto blanqueador deseado puede lograrse en tan solo 30 minutos o puede aplicarse cómodamente durante la noche mientras duerme. Hay una gran variedad de concentraciones de Pola Day y Pola Night que los pacientes pueden utilizar de forma domiciliaria. Utilice el selector de pola para elegir el producto más apropiado para su paciente (visite www.polawhite.com.au).

Tecnología Desensibilizante Pola (TDP)

Pola Day y Pola Night contiene TDP que contribuye a la prevención de la sensibilidad postoperatoria.

¿Cuál es la diferencia entre Pola Day y Pola Night?

Pola Day consiste en una amplia gama de gel a base de peróxido de hidrógeno de aplicación domiciliaria específicamente diseñados para lograr resultados de blanqueamiento en pacientes que dispongan de poco tiempo.

Pola Night es una gama de gel a base de peróxido de carbamida de aplicación domiciliaria que proporcionan resultados de blanqueamiento óptimos en pacientes que tengan dientes más sensibles.

Ambas gamas están disponibles en una variedad de diferentes concentraciones, que se adapta a cada historial de sensibilidad del paciente.

Pola For Aligners

Alineación y blanqueamiento simultáneos

Presentamos Pola For Aligners, el gel blanqueador Pola especialmente formulado para su uso con alineadores de ortodoncia.

Pola For Aligners se puede usar fácilmente como un kit de blanqueamiento domiciliario que garantiza una excelente experiencia para el paciente, ya que le permite lograr una sonrisa más blanca y luminosa sin tiempo de uso adicional.

Pola For Aligners incorpora los mismos beneficios que la galardonada fórmula blanqueadora de Pola

- Máxima comodidad para el paciente en un kit de blanqueamiento
- Contiene nitrato de potasio y flúor para reducir la sensibilidad durante su uso a largo plazo
- El gel de alta viscosidad garantiza una aplicación fácil y segura en el alineador, y su permanencia en el lugar de colocación

Disponible en un práctico kits de 4 jeringas, para uso domiciliario tanto diurno como nocturno

- El sistema Pola For Aligners está disponible con el gel de peróxido de carbamida al 10 % Pola Night, que ha sido cuidadosamente seleccionado como el agente blanqueador ideal para adaptarse a cualquier sistema de alineadores. Permite a los pacientes personalizar el tratamiento: desde solo un par de horas al día entre comidas hasta la comodidad de un uso durante toda la noche
- La investigación clínica ha identificado el peróxido de carbamida al 10 % como el tratamiento de blanqueamiento dental de referencia, ya que brinda unos resultados de blanqueamiento óptimos al mismo tiempo que mantiene la máxima seguridad y comodidad para el paciente*



SEGURO PARA USO DURANTE TODA LA NOCHE



FÁCIL DE UTILIZAR



LIBERACIÓN DE FLÚOR



PROFESIONALMENTE UTILIZADO Y RECOMENDADO





Pola Light

Un nuevo sistema avanzado de blanqueamiento dental de aplicación domiciliario con tecnología led

Disfrute de una sonrisa más blanca y radiante en tan solo 5 días.

Pola Light es un sistema avanzado de blanqueamiento dental que combina la fórmula del blanqueamiento Pola, sistema premiado por la industria, con una férula LED, para un tratamiento de blanqueamiento más rápido.

- El sistema Pola Light se combina con el gel Pola Day.
- De rápida acción, se consiguen dientes más blancos en tan solo 5 días.
- Formulado para eliminar con seguridad las manchas más duraderas.
- Recargable para tratamientos posteriores.
- Remineralización para fortalecer los dientes.
- Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad.



Escanee el código QR para obtener instrucciones paso a paso.



A PARTIR DE TAN SOLO 20 MINUTOS AL DÍA

Tratamientos de 2 x10 o 2 x 15 minutos al día.



FÁCIL DE USAR

Portátil, recargable y fácil de utilizar sin cables unidos a la férula.

La férula LED de Pola está formada por un doble arco de tamaño universal.



DIENTES MÁS BLANCOS EN CINCO DÍAS

Tratamiento de 5 días.

Sin necesidad de pasar por el sillón dental ni de férulas personalizadas, ahorrando tiempo tanto para el paciente como para el dentista.




PUSADO Y RECOMENDADO POR PROFESIONALES

Pola es un sistema profesional de blanqueamiento dental en el que confían los dentistas, lo recomiendan para lograr una sonrisa más blanca, de forma más rápida y segura.

Los geles de blanqueamiento dental con alta viscosidad y pH neutro garantizan la mayor comodidad del paciente, en un kit de uso domiciliario.

La mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido en agua permite reducir la sensibilidad.

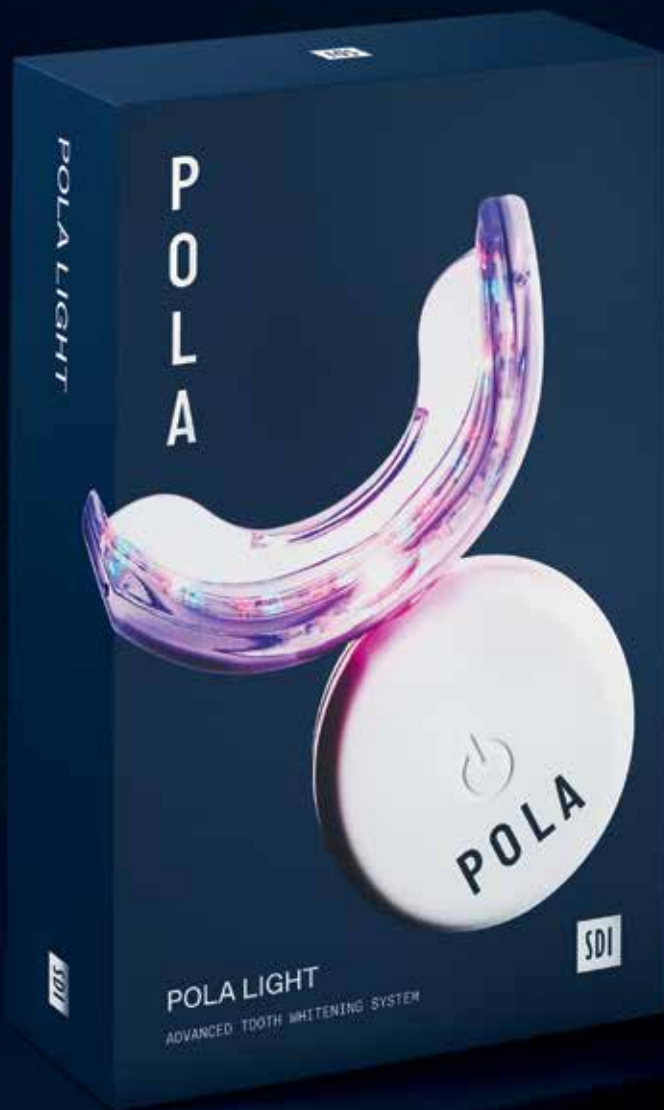



Para completar

el tratamiento



Pola Luminare



Con un 6 % de peróxido de hidrógeno, Pola Luminare es nuestro blanqueador dental mediante cepillado de mayor concentración. Cepille directamente sobre los dientes sin necesidad de férulas. Diseñado para utilizarse durante tan solo 30 minutos, Pola Luminare es la herramienta de retoque ideal para mantener brillante y blanca su sonrisa entre sus visitas al dentista. Con más de 60 aplicaciones en un tubo y un sabor a menta de larga duración, puede blanquear sus dientes en cualquier lugar y momento.







POLA DAY

SDI

POLA

POLA
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

SDI

POLA

POLA RAPID
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

POLA RAPID

TOOTH BLEACH GEL
ONE PATIENT KIT
KEEP REFRIGERATED
6% HYDROGEN PEROXIDE

Pola Whitening Stand

Diseño inteligente

El soporte de blanqueamiento Pola tiene un diseño inteligente, estilizado para acoplar tanto la luz de fotocurado Radii Plus como Radii Xpert.

Amplia gama de movimientos y ajustes

El soporte de blanqueamiento Pola tiene cinco puntos de rotación, permitiéndole ajustarlo a 360° para conseguir la posición exacta que necesite.

Versátil

El soporte puede colocarse junto al paciente o detrás de este, en función de las necesidades prácticas.

Equipado con ruedas

El soporte está equipado con ruedas que permiten una completa libertad de movimientos y control de un gabinete a otro.

Ligero, inalámbrico y compacto

Mover y posicionar el soporte es sencillo gracias a su diseño ligero e inalámbrico.

El soporte compacto es fácil de limpiar y puede almacenarse fácilmente cuando no esté en uso.

Estabilidad del sistema

Los frenos del soporte garantizan que la base permanezca de manera estable en su lugar mientras se esté utilizando.



Escanee el código QR para obtener instrucciones paso a paso.



CASOS CLÍNICOS



Dr Vijay Vadher
UK

Pola Night 16%



Dr Linda Greenwall
UK

Pola Night 10% CP for Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Spain

Pola Day 6%



**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%



F




A

¿Qué provoca la decoloración dental?

Los dientes de cada persona son únicos, por tanto, se descolorean y manchan de distintas maneras. La descoloración o las manchas de los dientes de una persona están provocadas habitualmente por el café, el té negro, las infusiones, el vino tinto, las comidas picantes, como por ejemplo el curry, y el tabaco.

¿Cómo funciona el blanqueamiento dental?

Cuando se aplica un producto blanqueador al diente se descompone en agua e iones de oxígeno. Los iones de oxígeno penetran en el esmalte y atacan las moléculas largas de las manchas para romperlas eficientemente y hacerlas más cortas e incoloras. Dichas moléculas cortas e incoloras son retiradas del diente de manera natural gracias a la saliva. La intensidad del blanqueamiento está asociada al número de iones disponibles y el tiempo que hayan estado en el diente.

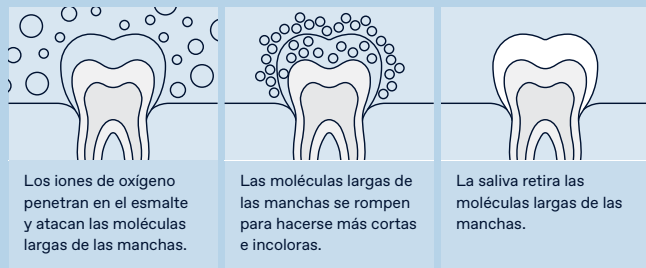

¿Cuánto se tarda en blanquear los dientes de un paciente?

Con un blanqueamiento en consulta, los resultados se obtienen en tan solo 30 minutos de tratamiento. Mediante un sistema de blanqueamiento en casa, puede tomar aproximadamente de 5 a 14 días.

Q

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de blanqueamiento?

Depende de cada persona y sus hábitos bucodentales. El blanqueamiento debe repetirse cada 6 a 12 meses, tanto para tratamientos en consulta como en casa. Sin un retoque, los dientes de sus pacientes volverán a mancharse por el mismo motivo que provocó que se descolorarán inicialmente.

¿Qué sucede si el paciente tiene restauraciones o carillas, cambiará el color de estas?

El blanqueamiento eliminará cualquier mancha existente en la restauración pero no tendrá efecto en el tono original.

¿Existe algún efecto secundario?

Siguiendo las instrucciones de uso incluidas con los productos Pola, en la mayoría de los casos no tendrá efectos secundarios. Sin embargo, puede experimentarse una sensibilidad temporal (dolor sordo o agudo, sensibilidad al calor o al frío). Esto disminuirá unas horas después del final del tratamiento y no dejará ningún problema residual. El tiempo de utilización puede acortarse o reducir su frecuencia o los dientes pueden ser tratados con un desensibilizante. El paciente deberá abstenerse de tomar bebidas gaseosas, cítricos y bebidas cítricas para evitar la sensibilidad.

¿Es seguro el blanqueamiento dental durante el embarazo?

No se recomienda el uso de productos de blanqueamiento durante el embarazo.

Pola In Office

POLA RAPID

Pola Rapid 6% Kit 1 jeringa de 2,8 mL	7700510
Pola Rapid 6% Kit 3 jeringas de 2,8 mL	7700511

SOPORTE DE BLANQUEAMIENTO POLA

1 x tripode 1 x adaptador para SDI Radii Plus 1 x adaptador para SDI Radii Xpert Accesorios	7700989
--	---------

Nota: cada pack incluye accesorios.
CP: Carbamide Peroxide HP: Hydrogen Peroxide

Pola En La Consulta

POLA DAY

Pola Day Kit de 4 X 1,3g jeringas (6% HP)	7700357
Pola Day 10 x 1,3g Kits de jeringas (6% HP)	7700359
Pola Day Kit de 50 X 1,3g jeringas Bulk Kit (6% HP)	7700361
Pola Day Kit de 50 X 1,3g jeringas (6% HP)	7700079

POLA NIGHT

Pola Night Kit de 4 X 1,3g jeringas (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 x 1,3g Kits de jeringas (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377
Pola Night Kit de 50 X 1,3g jeringas Bulk Kit (10% CP) (16% CP)	7700373 7700379

Pola En Casa

POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners (10% CP) 4 x 3g jeringas	7700556
---	---------

POLA LIGHT

Pola Light (6% HP) 4 x 3g Pola Day jeringas	7700985
--	---------

POLA LIGHT DISPLAY STAND

1 x Stand	7700979
-----------	---------

TRAY CASES

Estuche de 5 férulas paquete de 5 estuches para férulas	7750008
--	---------

MATERIAL PARA FÉRULAS

20 piezas de repuesto	7750005
-----------------------	---------

RESINA ESPACIADORA

2 x jeringas de 1 g de resina espaciadora	7700012
---	---------

BOLSILLOS COSMÉTICOS POLA

10 bolsillos	7700994
--------------	---------

Pola On The Go

POLA LUMINATE

Pola Luminate 1 x 5.5mL	7700092
----------------------------	---------

Material Promocional

Soporte marketing para promocionar el tratamiento de blanqueamiento dental en su clínica.



Poster Pola Day
Pedido M110145



Poster Pola Night
Pedido M110146



Poster Pola Rapid
Pedido M110176



Stand Antes y Después de Pola con soporte
Pedido M110151



Porta folletos Pola para pacientes
Pedido M110150



Folletos Pola para pacientes
Pedido M110144



Folletos Pola Light para pacientes
Pedido M110153



Bolsa Pola
Pedido M100332



Bolsa Pola
Pedido M100331



Pegatina Pola para ventana y escaparates
Pedido M110148



Pola video usb sala de espera
Pedido M100245



Material promocional personalizado
Más material promocional personalizado se encuentra disponible mediante descargas. Visite: www.sdi.com.au

SDI

SDI Limited está comprometida con la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de materiales dentales restauradores especializados. Los productos SDI son una combinación de innovación y excelencia para proporcionar materiales dentales ideales para el sector de la odontología.

MADE IN AUSTRALIA

by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
[@pola_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Para más información visite
polawhite.com.au



05-2025

M110149 A