



# Manual del usuario del revelador de biopelículas

- Nombre del producto:**  
Divulgador de biopelículas
- Modelo de producto y especificaciones de embalaje:**  
(Véase el envase del producto)
- Estructura y composición de las prestaciones del producto:**  
Compuesto principalmente de agua y pigmentos comestibles.
- Ámbito de aplicación:**  
Se utiliza para mostrar la placa, ayudar en el examen oral y el tratamiento.
- Fecha de producción y número de lote:**  
(Véase el envase del producto)
- periodo de garantía de calidad:**  
Caducidad de 2 años.
- Condiciones de almacenamiento:**  
Evitar la luz y mantener alejado de fuentes de fuego.
- destinado a:**  
Todas las personas mayores de 3 años.
- contraindicaciones:**  
No utilice este producto si presenta síntomas alérgicos como erupciones cutáneas o dermatitis.
- Instrucciones de uso del producto:**
  - 10.1 Aplique este producto sobre la superficie del diente con un pequeño bastoncillo de algodón o una bola de algodón, espere un momento;
  - 10.2 Enjuáguese la boca con agua limpia y escupa el exceso de indicador;
  - 10.3 Después de enjuagar la boca, las zonas manchadas de los dientes son los lugares de fijación de la placa;
  - 10.4 El revelador R es de tipo monocromo, con indicación de placa roja;
  - 10.5 El Discloser P es un tipo bicolor que puede distinguir entre placas bacterianas nuevas y viejas; la placa vieja es de color azul oscuro, y la placa nueva es de color rojo púrpura.
  - 10.6 Utilizar métodos como el cepillado dental o el chorro de arena para eliminar a fondo la placa dental.
- asuntos que requieren atención:**
  - 11.1 Destinado para uso profesional. Se con-  
seja que los niños menores de 12 años lo utili-  
cen bajo la supervisión de un adulto.
  - 11.2 Las materias primas contenidas en este  
producto son todas de calidad alimentaria.  
Aunque se produzca una pequeña ingestión  
accidental durante su uso, no tiene efectos  
secundarios.
  - 11.3 Las salpicaduras de pigmento pueden  
contaminar la ropa y la piel, utilícese con pre-  
caución.

## 12. Símbolo Explicación

	Marca registrada
	¡Ten cuidado!
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Productos sanitarios
	Identificador único del dispositivo
	Fabricante
	Consulte los documentos adjuntos
	Producto con marcado CE
	Representante autorizado en la COMUNIDAD EUROPEA



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

Importador mayorista Woodpecker / DTE  
para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid

Tifno.: 91 849 01 04

Tifno. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

**¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.**

**Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa**

Su distribuidor de confianza:

